



Order/Collect UBT sample 訂購/收取 UBT 樣本程序

1.) 訂購 UBT (Min. Order Qty: 10 sets)

可用以下任一方式：

- 致電或 WhatsApp Customer Hotline: 5363-4540
- Email 貴公司名稱, 姓名及電話至 michael.chan@mti-mill.com; 或
- Fax 貴公司名稱, 姓名及電話至 3427-9028

2.) 收取 UBT 樣本

請致電或 WhatsApp Customer Hotline: [5363-4540](tel:5363-4540) , 請留下貴公司名稱, 姓名及電話

收袋時間表

Monday – Friday

- 若 3:00pm前 致電我們收 UBT 樣本, 我們會委託順豐速運 SF EXPRESS 當日收取樣本
- 若 3:00pm後 致電, 有可能翌日才安排收取 (視乎順豐速運 SF EXPRESS)。

Saturday & Sunday

- 我們逢星期六、日休息, 星期六、日的樣本, 請致電或 WhatsApp Customer Hotline: 5363-4540 安排順豐速運 SF EXPRESS 收取樣本
- ◆ 測試報告, 於 24 小內, 先 Fax / email / WhatsApp, 後寄出正本
- ◆ 呼氣樣本在氣袋內, 可儲存 10天

碳-13 呼氣測試步驟：

1. 空腹呼氣(禁食 2 小時), 從口腔呼出氣體樣到淺藍色氣袋內
2. 用溫水送服一粒碳 13 尿素丸(C-13)
3. 靜坐 20 - 30 分鐘
4. 再次呼氣至粉紅色氣袋內, 測試完成

*注意事項

- 試驗前4周, 不可服用任何抗生素 antibiotics。
- 測試前2周, 不可服用任何處方或非處方質子泵抑制劑 Proton Pump Inhibitors。
- 在測試前2小時, 不吃或喝任何東西。

如有問題,請聯絡 Customer Hotline: 5363-4540